

## THECHVIR *Wipes*

Cada lenço limpa e desinfeta até 1m<sup>2</sup> de superfície. O tempo de ação efetiva para todos os microorganismos testados é de 10 minutos.

### Pilates e Fisioterapia

- **Aparelhos, bolas, e objetos de madeira, plástico, couro, ou ferro, borracha, EVA.:** Dobrar um lenço ao meio, e passar sobre a superfície a ser desinfetada. Ir dobrando até utilizar todos os lados limpos, enquanto estiver úmido. Não enxugar. Aguardar completa secagem antes de reutilizar.
- **Não recomendamos o uso dos lenços em materiais absorventes como tecidos, esponjas, EVA, etc. Neste caso utilizar Borrifação com Thechvir líquido PURO (SEM DILUIÇÃO), veja na página 2.**

### Estética

- **Ventosas de pump, eletrodos de borracha, placas de metal, ponteiros (borracha, metal, plástico):** Remover todo o produto (gel, óleo, creme, etc.) com a ajuda de um papel. Dobrar um lenço ao meio, e passar sobre a superfície a ser desinfetada. Ir dobrando até utilizar todos os lados limpos, enquanto estiver úmido. Não enxugar. Aguardar completa secagem antes de reutilizar.
- **Manoplas de massagem:** Lavar com água e sabão, esfregando com uma escova ou bucha nas reentrâncias. Dobrar um lenço ao meio, e passar sobre a superfície a ser desinfetada. Ir dobrando até utilizar todos os lados limpos, enquanto estiver úmido. Não enxugar. Aguardar completa secagem antes de reutilizar.
- **Espátulas e outros pequenos objetos metálicos, de plástico, ou borracha:** Lavar com água e sabão, esfregando com uma escova ou bucha nas reentrâncias. Dobrar um lenço ao meio, e passar sobre a superfície a ser desinfetada. Ir dobrando até utilizar todos os lados limpos, enquanto estiver úmido. Não enxugar. Aguardar completa secagem antes de reutilizar. Guardar os objetos em um recipiente fechado.
- **Macas, apoios de cabeça, carrinhos, mangueiras, aparelhos, superfícies:** Dobrar um lenço ao meio, e passar sobre a superfície a ser desinfetada. Ir dobrando até utilizar todos os lados limpos, enquanto estiver úmido. Não enxugar. Aguardar completa secagem antes de reutilizar.
- **Óculos, vidros, espelhos, e outros materiais lisos:** Dobrar um lenço ao meio, e passar sobre a superfície a ser desinfetada. Ir dobrando até utilizar todos os lados limpos, enquanto estiver úmido. Não enxugar. Caso você observe um embaçamento da superfície, após a secagem aplicar uma flanela com álcool.

### MICROORGANISMOS TESTADOS E TEMPO DE AÇÃO (LÍQUIDO OU LENÇO):

- Trichophyton mentagrophytes **30 seg.**
- Staphylococcus aureus (Pneumonia, Meningite, Endocardite) **30 seg.**
- Salmonella choleraesuis (Febre tifóide, Salmonelose) **30 seg.**
- Escherichia coli (Infecções do trato urinário) **30 seg.**
- Sars-Cov (Covid-19) **1 min.**
- KPC Klebsiella pneumoniae carbapenemase **1 min.**
- Pseudomona aeruginosa **1 min.**
- Vírus HIV **5 min.**
- Vírus Hepatite B **5 min.**
- Mycobacterium bovis (BCG) (Tuberculose) **10 min.**
- Cândida albicans (Candidíase) **10 min.**
- Bacillus subtilis **10 min.**
- Clostridium sporogenes. **10 min.**
- Mycobacterium avium (Fibrose cística, Fibrose pulmonar) **10 min.**
- Mycobacterium terrae **10 min.**
- Mycobacterium massiliense **10 min.**
- Mycobacterium smegmatis (Lepra, Tuberculose) **10 min.**

LEIA O VERSO →

## THECHVIR Líquido

Recomendamos a diluição nas proporções de 150ml de Thechvir para cada 1L de água. O tempo de ação efetiva para todos os microorganismos testados é de 10 minutos.

### Pilates e Fisioterapia

- **Aparelhos, bolas, e objetos de madeira, plástico, couro, ou ferro, borracha, EVA.:** Borrifar ou aplicar o Thechvir diluído em um pano (deve ficar bem úmido), e passar por toda as áreas. Umedecer novamente o pano sempre que secar. Não enxugar. Aguardar completa secagem antes de reutilizar.
- **Objetos de tecido e materiais absorventes:** Borrifar o Thechvir puro (SEM DILUIÇÃO), por toda as áreas. Aguardar completa secagem antes de reutilizar.

### Estética

- **Ventosas de pump, eletrodos de borracha, placas de metal, ponteiras (borracha, metal, plástico):** Remover todo o produto (gel, óleo, creme, etc.) com a ajuda de um papel. Aplicar o Thechvir diluído em um pano (deve ficar bem úmido), e passar por toda as áreas. Umedecer novamente o pano sempre que secar. Não enxugar. Aguardar completa secagem antes de reutilizar.
- **Manoplas de massagem:** Lavar com água e sabão, esfregando com uma escova ou bucha nas reentrâncias. Borrifar ou aplicar o Thechvir diluído em um pano (deve ficar bem úmido), e passar por toda as áreas. Umedecer novamente o pano sempre que secar. Não enxugar. Aguardar completa secagem antes de reutilizar.
- **Espátulas e outros pequenos objetos metálicos, de plástico, ou borracha:** Lavar com água e sabão, esfregando com uma escova ou bucha nas reentrâncias. Colocar os objetos em um recipiente raso, e cobrir com o Thechvir diluído. Deixar agir por 10 minutos. Enxaguar, e deixar para secar em uma toalha ou superfície limpa e desinfetada, cobertos por papel-toalha (para evitar novo contágio por microorganismos suspensos no ar), ou enxugar com uma toalha limpa. Após isso, guardar em um recipiente fechado.
- **Macas, apoios de cabeça, carrinhos, mangueiras, aparelhos, superfícies:** Aplicar o Thechvir diluído em um pano (deve ficar bem úmido), e passar por toda a extensão dos objetos. Umedecer novamente o pano sempre que secar. Não enxugar.
- **Óculos, vidros, espelhos, e outros materiais lisos:** Aplicar o Thechvir diluído em um pano (deve ficar bem úmido), e passar por toda a extensão dos objetos. Umedecer novamente o pano sempre que secar. Não enxugar. Caso você observe um embaçamento, após a secagem aplicar uma flanela com álcool.

### IMPORTANTE!

O peróxido de Hidrogênio pode reagir com a queratina da camada superficial da pele da mão, podendo causar ressecamento e leve esbranquiçamento (que desaparecerá em poucas horas), por isso recomendamos o manuseio da linha Thechvir com luvas de procedimento como as de vinil ou nitrílicas.

A diluição do thechvir líquido é indicada para o uso profissional na área da e beleza e saúde. A orientação de uso puro na embalagem foi idealizada apenas para uso hospitalar.

Não armazenar o Thechvir Líquido diluído por mais de 15 dias.

O Thechvir diluído pode ser usado para imersão até 2 vezes consecutivas (sem armazenamento entre elas), desde que a solução esteja límpida e sem resíduos. Após isso, o produto pode ser acondicionado em borrifador, e reutilizado em solados de sapato, pisos, e superfícies no geral.

A embalagem de Thechvir líquido possui um pequeno furo na tampa para escape da pressão de gases que podem se formar com o tempo de armazenamento. Durante o transporte podem haver pequenos escapes de líquido. **ARMAZENAR A EMBALAGEM DO THECHVIR LÍQUIDO NA VERTICAL** para evitar vazamentos.