

THECHVIR *Wipes*

Cada lenço limpa e desinfeta até 1m² de superfície. O tempo de ação efetiva para os microorganismos testados é de até 10 minutos.

• **Superfícies, carrinho de apoio, maca, cadeira, embalagens de produtos, espelhos, ventilador de mão, régua, paquímetro, espátula de plástico ou metal, dermapen, lápis dermatográfico, caneta, dermógrafo, cabos, celular etc:** Remover todo o excesso de sujidades. Ir dobrando até utilizar todos os lados limpos, enquanto estiver úmido. Não enxugar. Aguardar completa secagem antes de reutilizar.

MICROORGANISMOS TESTADOS E TEMPO DE AÇÃO (LÍQUIDO OU LENÇO):

- Trichophyton mentagrophytes **30 seg.**
- Staphylococcus aureus (Pneumonia, Meningite, Endocardite) **30 seg.**
- Salmonella choleraesuis (Febre tifóide, Salmonelose) **30 seg.**
- Escherichia coli (Infecções do trato urinário) **30 seg.**
- Sars-Cov (Covid-19) **1 min.**
- KPC Klebsiella pneumoniae carbapenemase **1 min.**
- Pseudomona aeruginosa **1 min.**
- Vírus HIV **5 min.**
- Vírus Hepatite B **5 min.**
- Mycobacterium bovis (BCG) (Tuberculose) **10 min.**
- Cândida albicans (Candidíase) **10 min.**
- Bacillus subtilis **10 min.**
- Clostridium sporogenes. **10 min.**
- Mycobacterium avium (Fibrose cística, Fibrose pulmonar) **10 min.**
- Mycobacterium terrae **10 min.**
- Mycobacterium massiliense **10 min.**
- Mycobacterium smegmatis (Lepra, Tuberculose) **10 min.**

IMPORTANTE!

- > O peróxido de Hidrogênio pode reagir com a queratina da camada superficial da pele da mão, podendo causar ressecamento e leve esbranquiçamento (que desaparecerá em poucas horas), por isso recomendamos o manuseio da linha Thechvir com luvas de procedimento como as de vinil ou nitrílicas.
- > A diluição do thechvir líquido é indicada para o uso profissional na área da e beleza e saúde. A orientação de uso na embalagem foi idealizada apenas para uso hospitalar.
- > Não armazenar o Thechvir Líquido diluído por mais de 15 dias.
- > O Thechvir diluído pode ser usado para imersão quantas vezes for necessário, desde que a solução esteja límpida e sem resíduos, respeitando o tempo limite de armazenamento de 15 dias.
- > A embalagem de Thechvir líquido possui um pequeno furo na tampa para escape da pressão de gases que podem se formar com o tempo de armazenamento. Durante o transporte podem haver pequenos escapes de líquido. **ARMAZENAR A EMBALAGEM DO THECHVIR LÍQUIDO NA VERTICAL** para evitar vazamentos.

LEIA O VERSO →

THECHVIR Líquido

Para Lash Design e Design de sobrancelha/coloração: Recomendamos a diluição nas proporções de 1 parte de Thechvir para 3 partes iguais de água.

Para micropigmentação: Recomendamos o uso do Thechvir puro (sem diluição).

O tempo de ação efetiva para os microorganismos testados é de até 10 minutos.

Imersão:

• **Tebori, pinças (exceto as destinadas a retirada de pêlos), escova de cílios ou sobrancelha, dappen, molde/pad de silicone (shield), almofada de silicone, batoque, espátula de plástico ou metal, anel-batoque, régua, paquímetro, pincel etc** : Lavar com água e detergente neutro. Colocar os objetos em um recipiente raso e cobrir com o Thechvir. Deixar agir por 10 minutos. Enxaguar, e deixar para secar em uma toalha ou superfície limpa e desinfetada, cobertos por papel-toalha (para evitar novo contágio por microorganismos suspensos no ar), ou enxugar com uma toalha limpa. Após a completa secagem, guardar em um recipiente fechado.

Pano umedecido:

• **Superfícies, carrinho de apoio, maca, cadeira, embalagens de produtos, espelhos, ventilador de mão, régua, paquímetro, espátula de plástico ou metal, dermapen, lápis dermatográfico, caneta, dermógrafo, cabos, celular etc**: Remover todo o excesso de sujidades. Aplicar o Thechvir em um pano (deve ficar bem úmido), e passar por todas as áreas. Umedecer novamente o pano sempre que secar. Não enxugar. Aguardar completa secagem antes de reutilizar.